

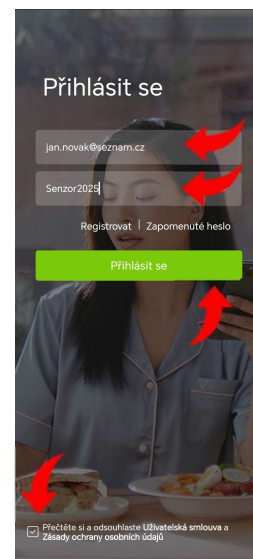


Stažení, registrace a přihlášení do aplikace Yuwell Anytime ve Vašem mobilním telefonu

1. Na mobilním telefonu zapněte fotoaparát, nebo čtečku QR kódů a načtěte odkaz pro získání aplikace z Vašeho obchodu,

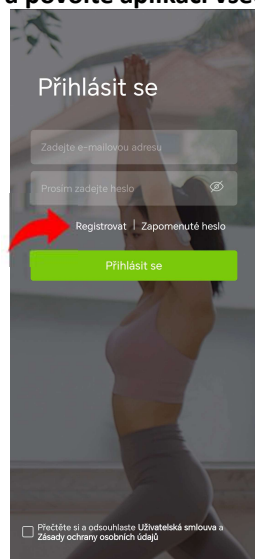

1. Klikněte na tlačítko „Instalovat“. Po nainstalování aplikace do mobilního telefonu klikněte na tlačítko „Otevřít“.
2. Na úvodní stránce aplikace Yuwell Anytime klikněte na „Registrovat“.
3. Vyplňte Váš e-mailový účet a vytvořte přístupové heslo, které budete používat pro přihlašování a klikněte na „Aktivovat účet“.
4. Do Vašeho e-mailu obdržíte aktivační zprávu od výrobce. Otevřete ji a potvrďte aktivaci účtu kliknutím na vložený link.
5. Vraťte se zpět do aplikace Yuwell Anytime.
6. Vyplňte přihlašovací údaje, potvrďte přečtení „Podmínek používání“ a klikněte na „Přihlásit se“.
7. Vyplňte údaje osobního profilu a povolte aplikaci všechny vyžadované požadavky na oprávnění.

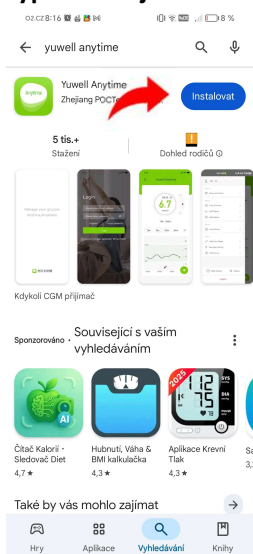

yuwell
Anytime™



MTE

MTE. Spol.s.r.o.
Hybešova 43, 602 00 Brno
www.mte.cz
Odborný konzultant : Moucha Tomáš
Telefon: +420 602 591 397

Vytvoření účtu v aplikaci Glooko

1. Na mobilním telefonu, nebo počítači v aplikaci internetového prohlížeče zadejte adresu: www.glooko.com
2. Na úvodní stránce Glooko klikněte na odkaz „Login“ v pravém horním rohu.



glooko



3. Na přihlašovací stránce můžete zvolit jazykovou lokaci „Čeština“ a poté klikněte na link „Registrujte se zde“.
4. Zvolte možnost „Zaregistrovat se za sebe“, nebo „Zaregistrovat nezletilého“.
5. Vyplňte povinné údaje: e-mailovou adresu, jméno, příjmení, země pobytu, datum narození.
6. Vytvořte si „Heslo“ pro opakované přihlašování do Vašeho profilu.
7. Vyplňte „Kód kliniky“ Vašeho diabetologa. Pokud neznáte, vyplňte prosím „czmtespol“.
8. Potvrďte přečtení „Podmínek používání“ a „Ochrany soukromí“ a poté klikněte na „Registrovat“
9. Na stránce výběru zařízení vyberte „Žádné“, zaškrtněte „Přidat zařízení později“ a klikněte na „Další“ k dokončení registrace

Zaregistrujte se u Glooko

Glooko vám umožní synchronizovat data vašich zařízení pro diabetes a sledovat vaši aktivitu, abyste viděli, co ovlivňuje vaše hodnoty glykémie.

Pro koho vytváříte tento účet?

Zaregistrovat se za sebe

Vytvořte účet pro dospělou osobu, která je starší než zákonem stanovený věk.

Zaregistrovat nezletilého

K vytvoření účtu pro osobu mladší, než je zákonný věk, je nutný souhlas rodiče nebo opatrovníka.

Zaregistrujte se u Glooko

Glooko vám umožní synchronizovat data vašich zařízení pro diabetes a sledovat vaši aktivitu, abyste viděli, co ovlivňuje vaše hodnoty glykémie.

Řekněte nám o sobě více

Pokud vytváříte účet jménem jiné osoby, zadejte její údaje níže.

E-mail (Uživatelské jméno)

jan.novak@seznam.cz

Vytvořte heslo

Senzor2025

Síla hesla: Dobře

- ✓ Minimálně 8 znaků
- ✓ Minimálně „ucházející“ síla

Křestní jméno

Jan

Příjmení

Novák

Země pobytu

Česká republika

Telefonní číslo mobilu (volitelné)

+420

☐ Zaškrtnutím tohoto políčka souhlasím, že chci dostávat textové zprávy o programu Glooko. Mohou být účtovány poplatky za SMS a data.

Datum narození

15

únor

1985

Kód (volitelné)

czmtespol

Podmínky

☒ Beru na vědomí, že s mými osobními údaji bude nakládáno tak, jak je uvedeno v dokumentu [Oznámení o ochraně soukromí](#) společnosti Glooko

☒ Přečetl(a) jsem si [Podmínky používání](#) Glooko a souhlasím s nimi.

☐ (Volitelné) Souhlasím se zasíláním aktualizovaných informací, novinek a další marketingové komunikace e-mailem. Odběr mohu kdykoli odhlásit.

Registrace

Vyberte svá zařízení

Vyberte zařízení pro diabetes, která používáte. Pošleme vám vše, co potřebujete, abyste je mohli synchronizovat s Glooko.

Vyberte svůj chytrý telefon



Nebojte se, i tak můžete být schopni synchronizovat se svým počítačem.

Vyberte všechna svá zařízení pro diabetes

Q Vyhledat (zařízení nebo značku)

ACCU-CHEK

☐ Active

☐ Aviva Combo

Nevíte své zařízení pro diabetes? [Kontaktujte nás](#)

☒ Přidat mé zařízení později.

Další